

# Physiotherapy Room

## PÉDALIER D'EXERCICE

### MANUEL DE L'UTILISATEUR

#### **AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX**


Lisez attentivement toutes les instructions et avertissements avant d'essayer d'assembler ou d'utiliser le produit.

#### **AVERTISSEMENTS**

- ▲ Consultez votre physiothérapeute ou professionnel de la santé avant de commencer tout programme d'exercice
- ▲ Vérifiez que tous les éléments de fixation (c'est-à-dire les vis, les joints et les raccords) du pédalier sont bien serrés et sécurisés.
- ▲ Vérifiez les pièces endommagées, les déchirures, les fissures ou l'usure. NE PAS utiliser si le produit présente des signes de dommages.

#### **INSTRUCTIONS D'UTILISATION**

1. DÉPLIER L'EXERCICE À PÉDALES. Tirez le tube de base (A) vers l'extérieur jusqu'à ce que le bouton-pression du joint dépasse complètement du trou du support et qu'un clic se fasse entendre. Répétez sur le tube de base (B).

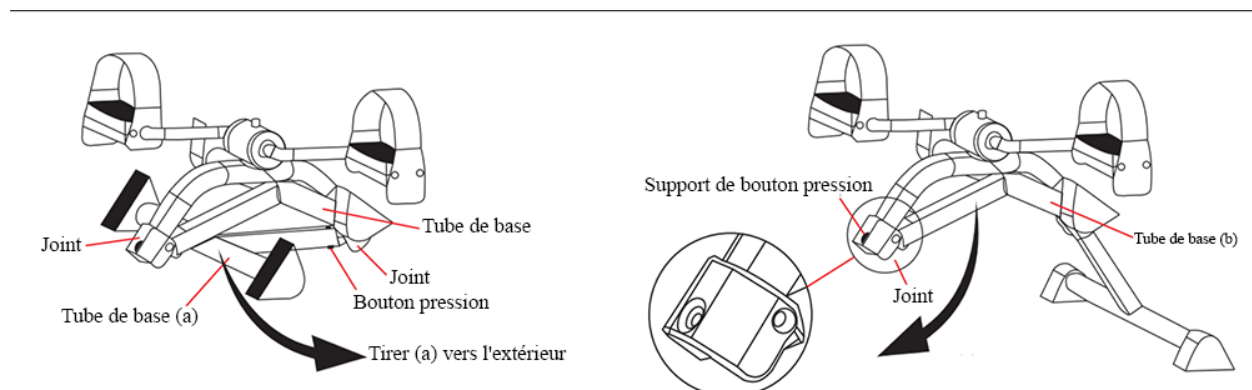

#### **CONTACTEZ-NOUS**

[www.physiostore.ca](http://www.physiostore.ca)

22635 Komoka Road, Komoka, Ontario, Canada N0L 1R0

Toll Free Tel: 844-939 6333